


คู่มือการใช้งาน  
หุ่นฝึกทำคลอดแบบครึ่งตัว  
(LM-101B)


1. ชิ้นส่วนของหุ่นจำลองฝึกหัดการทำคลอด

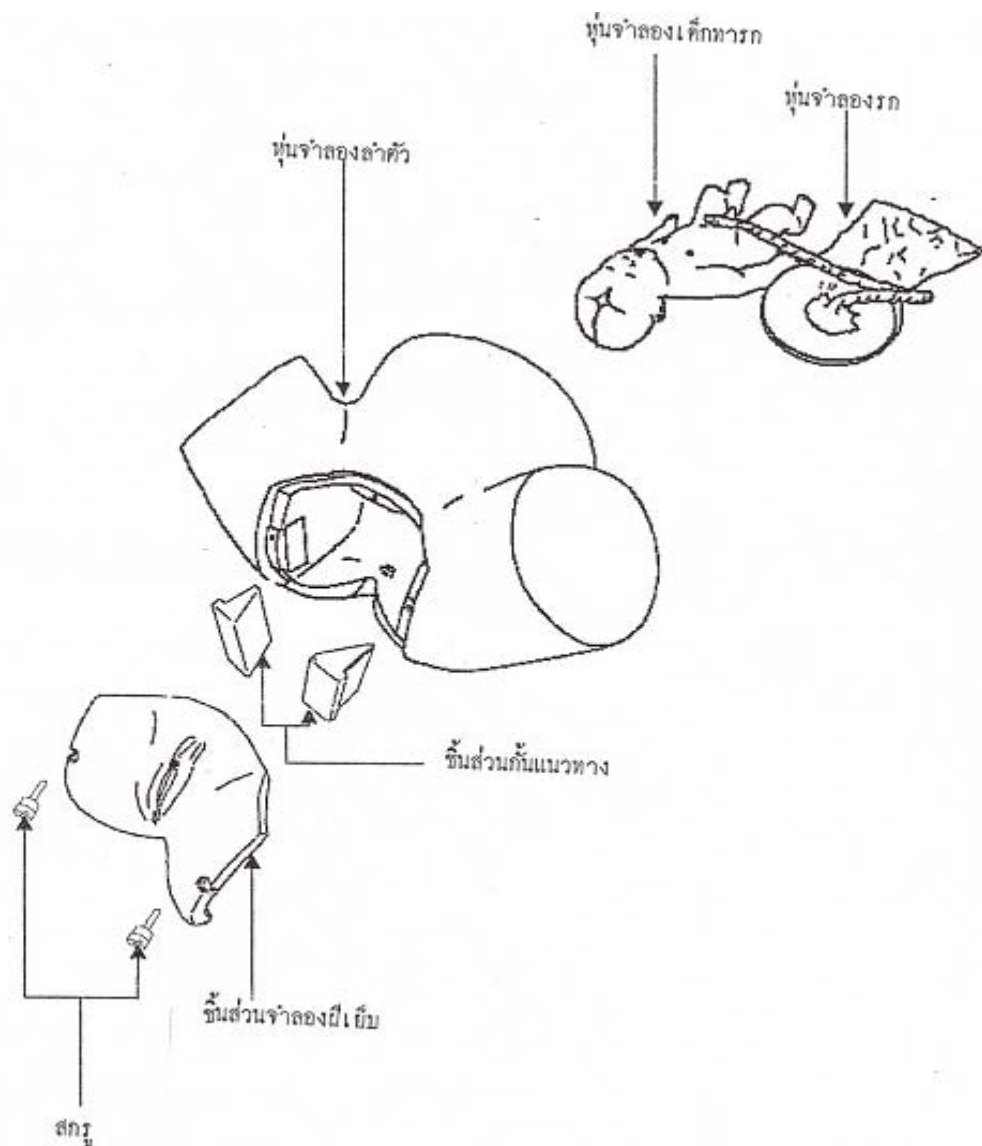

## 2. วิธีการใช้หุ่นจำลองฝึกหัดการทำคลอด

### 2.1 การใส่ชิ้นส่วนก้นแนวทาง

ติดชิ้นส่วนก้นแนวทาง เข้ากับหุ่นจำลองลำตัวด้วย Velcro Tape ซึ่งอยู่ด้านในของหุ่นจำลองลำตัวดังรูป โดยตรวจสอบทิศทางของชิ้นส่วนก้นแนวทาง

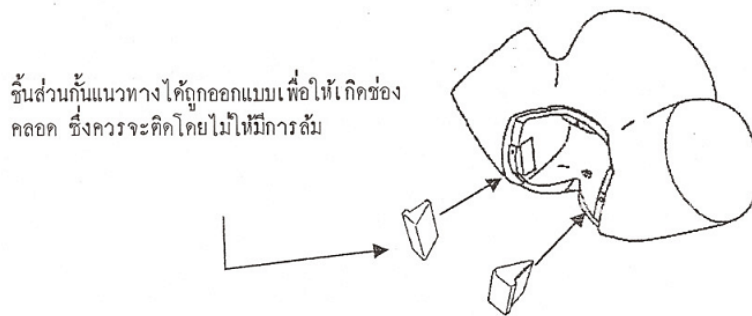

### 2.2 วิธีการติดชิ้นส่วนฝีเย็บ


ติดชิ้นส่วนฝีเย็บเข้ากับหุ่นจำลองลำตัว แล้วยึดลำตัวด้วยสกรู (สกรูสามารถขันให้แน่นด้วยเหรียญ หรือ ไขควง)




### 2.3 วิธีการต่อหุ่นจำลองเด็กทารกกับหุ่นจำลองรก

ม้วนผิวหนังบริเวณตะขอของสายสะดือ แล้วเกี่ยวเข้ากับหุ่นจำลองเด็กทารกบริเวณสะดือ



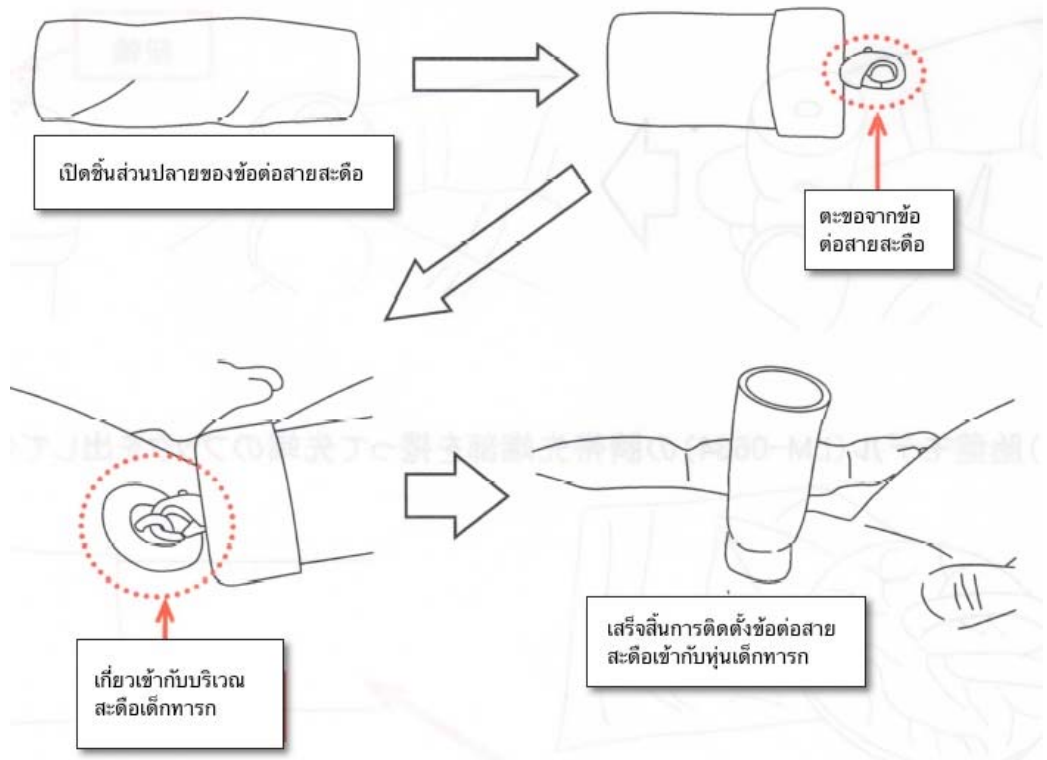

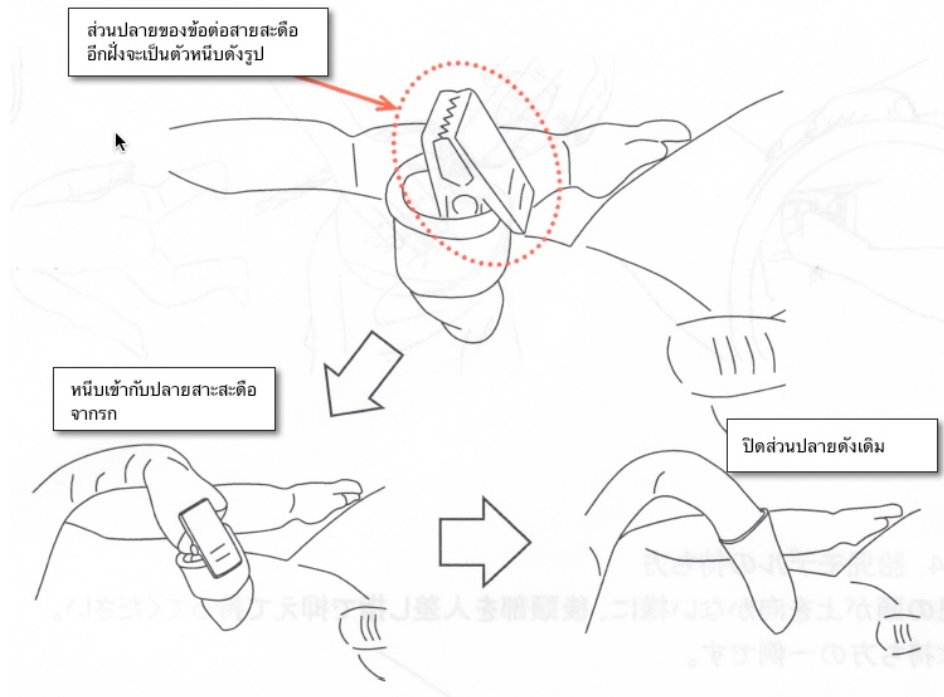

เสร็จสิ้นขั้นตอน




## 2.4 วิธีการใช้สารหล่อลื่น

ใช้ Glycerin จำนวนมากด้านในของฝีเย็บ ส่วนของศีรษะและไหล่ของหุ่นจำลองเด็กทารก และบริเวณพื้นผิวทั้งหมดของหุ่นจำลองรก

## 2.5 วิธีการจับหุ่นจำลองเด็กทารก

วางหุ่นจำลองเด็กทารกบนฝ่ามือ สอดนิ้วชี้เข้าไปในปากแล้วจับให้แน่น

**\*\*ดึงนิ้วชี้ที่สอดไว้ในปากหุ่นเด็กทารก เพื่อยึดศีรษะหุ่นเด็กทารกไม่ให้แหงนขึ้น\*\***

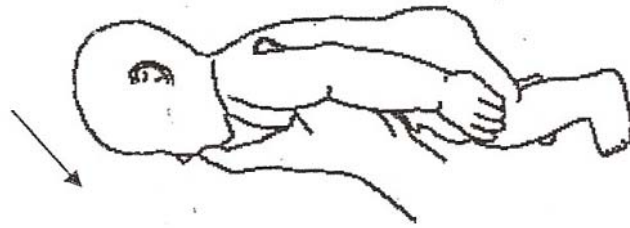

## 3. สิ่งที่ต้องระวังในการดูแลหุ่นจำลองฝึกการทำคลอด

1. หุ่นจำลองนี้ออกแบบให้ความรู้สึกสัมผัสคล้ายคนจริง การปฏิบัติแบบหยาบจะทำให้หุ่นจำลองเกิดความเสียหายได้
2. การดึงนิ้วชี้ในปากของหุ่นเด็กทารก เพื่อยึดไม่ให้แหงนขึ้น
3. ไม่ควรดึงสายสะดือแรงๆ ในขณะที่ฝึกการทำคลอดรก
4. ไม่ควรใช้ Umbilical Clip เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายแก่สายสะดือ
5. ทำความสะอาดด้วยน้ำผสมสบู่ ใช้ผ้าก๊อชหรือวัสดุคล้ายคลึงทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นด้วย Ethanol ไม่ควรใช้ Thinner หรือ Benzine
6. ระวังอย่าทำหุ่นจำลองหล่นลงพื้น หรือกระแทกแรงๆ จะทำให้เกิดความเสียหาย
7. เก็บรักษาหุ่นจำลอง อย่าให้โดนแสงแดดโดยตรง

## 4. การดูแลรักษาหุ่นจำลองฝึกการทำคลอด

### 4.1 การทำความสะอาดหุ่นจำลองลำตัว

ล้างภายในหุ่นด้วยน้ำขณะที่สกรูชันปิด เพื่อป้องกันน้ำเข้าในตัวหุ่นจำลองลำตัว

### 4.2 การทำความสะอาดหุ่นจำลองเด็กทารกและหุ่นจำลองรก

ล้างหุ่นจำลองเด็กทารกและหุ่นจำลองรกด้วยน้ำสะอาด